




  
**contralco**

CONTRALCO BP 23 34150 GIGNAC FRANCE  
Tél: 33 (0)4 67 57 62 62 Fax: 33 (0)4 67 57 68 12  
internet : <http://www.contralco.fr> - mail : [info@contralco.fr](mailto:info@contralco.fr)


Ref: EGP 0.25 Fabriqué en France Brevet déposé

## Mode d'emploi ETHYLOTEST à USAGE UNIQUE

Attendez au minimum 10 minutes après avoir absorbé une boisson alcoolisée.

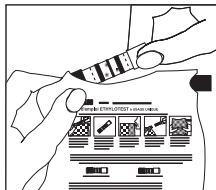


1) Sortir le tube du ballon comme indiqué par la flèche.

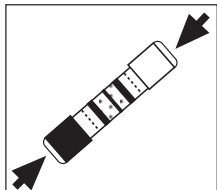


2) Percer les opercules du tube en enfonçant les perforateurs jusqu'aux pointillés.



3) Gonfler entièrement le ballon en une seule fois.

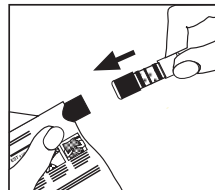


4) Insérer entièrement le perforateur bleu du tube dans l'embout du ballon.

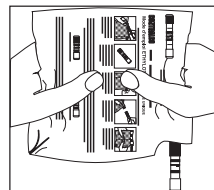


5) Vider entièrement le ballon en 12 secondes environ.

**L'alcoolémie maximale est atteinte environ une heure après la dernière consommation d'alcool. Interpréter le test entre 2 et 15 minutes après avoir vidé l'air du ballon par le tube.**

En présence d'alcool, les cristaux de réactif se colorent en vert. Si la coloration verte atteint ou dépasse l'anneau central, vous êtes au-dessus du seuil réglementaire de 0,25 mg/litre d'air équivalent à 0,5 g/litre de sang.

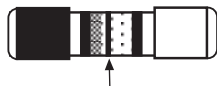

Inférieur au seuil réglementaire

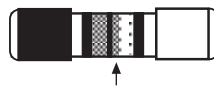

Supérieur au seuil réglementaire

**Vous êtes en infraction : Ne conduisez pas**

**Avant d'utiliser ce produit, lire attentivement les informations ci-dessous.**

Ne pas laisser à la portée des enfants ou des animaux. Ne pas avaler.

Le test contient des produits chimiques corrosifs. Ne pas mettre en contact avec les vêtements.

Ne pas orienter le test vers une personne lors du dégonflage.

En cas de contact du réactif avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Ne fumez pas avant de gonfler le ballon, le contraste de la réaction pourrait en être affecté.

A utiliser entre 10°C et 40°C.

Cet éthylotest n'est utilisable qu'une seule fois quel que soit le résultat.

Après usage, ne le conservez pas, jetez l'ensemble dans une poubelle.



**Caractéristiques certifiées selon la Norme NFX 20-702 :**

- Caractéristiques Techniques.
- Qualités Métrologiques maintenues malgré les variations de température et des paramètres d'expiration.
- Essais de vieillissement thermique.

**AFAC-AFNOR CERTIFICATION** 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex



Les résultats de ce test ne peuvent, en aucun cas, être opposables à ceux obtenus lors de contrôles officiels. Les décisions prises par l'utilisateur, en fonction du résultat de ce test sont de sa seule et unique responsabilité. Avec une alcoolémie de 0,5g/l de sang, le risque d'accident routier est multiplié par trois. Le fabricant et ses distributeurs dégagent toute responsabilité si le produit est utilisé en dehors de sa destination ou si les précautions et le mode d'emploi ne sont pas respectés.

Eviter un stockage prolongé à plus de 40°C ou à la lumière. Attention fragile, tube de verre.

80 10 22